

OVA

Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el




Bevezetés

Az Ova Therma Belt enyhítő hőterápiát és gyengéd masszázst kínál, hogy segítsen kezelni a menstruációs fájdalmak tüneteit.

A derékra csatolva viselhető eszköz három hőmérsékleti beállítással rendelkezik, hogy maximális enyhülést nyújtson.

Használati utasítás

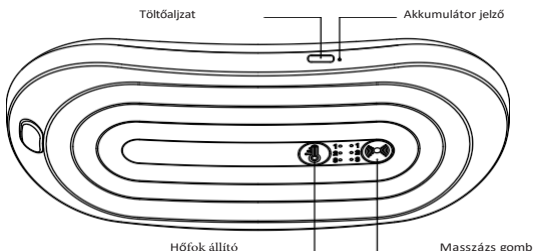

Helyezze az övet a derekára. Az övet a ruházat felett kell viselni.

Az öv viselhető az alsó hasrészen vagy a hát alsó részén. Válassza ki azt a pozíciót, amelyik a legnagyobb megkönnyebbülést nyújtja.

1. Az öv a fűtés vagy a masszázs mód bekapcsolásával indítható el. Tartsa lenyomva a fűtés gombot a hőterápia elindításához, és a masszázs gombot a masszázs elindításához.
2. A hő- és masszázsgombok megnyomásával válassza ki a kívánt hőmérsékletet és masszázst módot.

	Alapértelmezett	1. gombnyomás	2. gombnyomás
Fűtés	50	55	60 °C
Masszázs	1.üzemmód	2.mód	3.mód

A készüléket akár folyamatosan is viselheti, amíg enyhülésre van szüksége, azonban rendszeresen (20-30 percenként) változtassa a helyét.

3. A hő- és/vagy masszázs funkciót a hő- és/vagy masszázs gombok lenyomva tartásával kapcsolhatja ki. Ezzel az öv kikapcsol.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az akkumulátor jelzőfény pirosan villog. Az Ova Therma Belt az USB-C töltőkábel segítségével csatlakoztatható az áramforráshoz. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen feltöltött.

Figyelem: Töltés közben ne használja a készüléket.

Biztonsági irányelvek

- Ne használja, ha közhelyben, méhnyakrákban vagy szívbetegségben szenved.
- Ne használja, ha terhes.
- Hosszú ideig tartó használat esetén rendszeresen helyezze át a párnát. Ha a bőr rendellenes reakciót mutat, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használja, ha érzékeny bőre van, vagy ha nem érzékeny a hőre.
- Ne használja sérült bőrön vagy nem gyógyult sebekben.
- Alvás közben ne használja.
- Ne használja magas hőmérsékleten, gyúlékony, elektromágneses sugárzásnak kitett és párás környezetben.

Garancia

A termékre 1 év garancia vonatkozik a vásárlás napjától számítva, amely gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia a készülékre vonatkozik, és nem terjed ki a töltőkábelre.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket módosítják vagy átalakítják, helytelenül vagy visszaélészerűen használják; szállítás közben megsérül; nem gondoskodnak róla megfelelően; leejtik; vízbe merítik; a használati utasítás be nem tartása miatt sérül; vagy a TensCare Ltd. engedélye nélkül javítják.

Mielőtt a készüléket szervizbe küldené, kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és kövesse az abban szereplő utasításokat. Ha a jótállási időn belül javításra van szükség, kérjük, küldje vissza a készüléket a következő adatokkal:

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, vásárlás dátuma, vásárlási bizonylat.

A visszaküldött termékeket a következő címre kell elküldeni:

TensCare Ltd, 9 Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9BE, Egyesült


Királyság. További információért hívja a +44 (0) 1372 723 434

telefonszámot.

Bevezetés

Az Ova Thermo Belt nyugtató hőterápiát és gyengéd masszázst kínál, hogy segítsen kezelni a menstruációs fájdalom tüneteit. A derék köré viselhető eszköz három hőmérsékleti beállítással rendelkezik, hogy maximális enyhülést nyújtson.

Használati utasítás

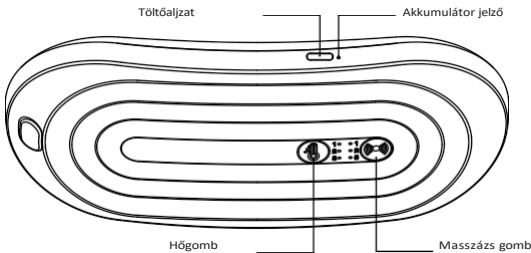

Helyezze a övet a derekára. Az övet a ruházat felett kell viselni.

Az öv viselhető az alsó hasrészén vagy a hát alsó részén. Válassza ki azt a pozíciót, amelyik a legnagyobb megkönnyebbülést nyújtja.

1. Az öv bekapcsolható a fűtés vagy a masszázs módok elindításával. Tartsa lenyomva a fűtés gombot a hőterápia elindításához, és a masszázs gombot a masszázs elindításához.
2. A hő- és masszázsgombok megnyomásával válassza ki a kívánt hőmérsékletet és masszázst módokat.

	Alapértelmezett	1. nyomás	2. nyomás
Hő	50 °C	55 °C	60 °C
Masszázs	Modo 1	Modo 2	3.mód

A készüléket addig viselheti, amíg enyhülésre van szüksége. Azonban a párnát rendszeresen át kell helyezni.

3. A hő és/vagy masszázs funkciót a hő és/vagy masszázs gombok lenyomva tartásával kapcsolhatja ki. Ezzel a öv kikapcsol.

Ha az akkumulátor lemerül, a töltőcsatlakozó melletti fény pirosan villog. Az Ova Therma Belt az USB-C töltőkábel segítségével csatlakoztatható egy áramforráshoz. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen feltöltődött.

Figyelem: Töltés közben ne használja.

Biztonsági előírások

- Ne használja, ha köszvényben, méhnyakrákban vagy szívbetegségben szenved.
- Ne használja, ha terhes.
- Hosszú ideig tartó használat esetén rendszeresen változtassa meg a párna helyzetét. Ha a bőr rendellenes reakciót mutat, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használja, ha érzékeny a bőre, vagy ha nem érzékeny a hőre.
- Ne használja repedt bőrön vagy nem gyógyult sebekben.
- Alvás közben ne használja.
- Ne használja nagyon meleg, gyúlékony, elektromágneses sugárzásnak kitett vagy nedves környezetben.

Garancia

A termékre 1 év garancia vonatkozik a gyártási hibákra a vásárlás napjától számítva. Ez a garancia az egységre vonatkozik, és nem tartalmazza a töltő kábelt.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket módosítják vagy átalakítják, ha nem rendeltetésszerűen vagy helytelenül használják, ha szállítás közben megsérül, ha nem gondoskodnak róla felelősségteljesen, ha leejtik, ha a készülék vízbe merül, ha a felhasználói kézikönyv utasításainak be nem tartása miatt károsodás keletkezik, vagy ha a TensCare Ltd. engedélye nélkül javítást végeznek a terméken.

Mielőtt a készüléket a szervizbe küldené, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és kövesse az abban szereplő utasításokat. Ha a jótállási időn belül javításra van szükség, kérjük, küldje vissza a készüléket a következő adatokkal:

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, vásárlás dátuma, vásárlási bizonylat.
A visszaküldött termékeket a következő címre kell elküldeni: TensCare Ltd,
9 Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9BE, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG.
További információért hívja a +44 (0) 1372 723 434 telefonszámot.

Forgalmazó :

TensCare Ltd

9 Blenheim Road, Epsom, Surrey,

KT19 9BE, Egyesült Királyság

+44 (0) 1372 723434

I-OVATH-ML [UK,ES,FR,DE,IT,NL] Rev

1.0 06/23

